

# PERNOVA


Bruksanvisning för:

## Totalsele

| Storlek | Art.nr. | Färgkod |
|---------|---------|---------|
| XS      | TL-7199 | Vit     |
| S       | TL-7200 | Röd     |
| M       | TL-7202 | Gul     |
| L       | TL-7203 | Grön    |
| XL      | TL-7204 | Blå     |



Våra lyftselar är kända för sin höga kvalitet och sin goda passform. Stropparna har flera upphängningsmöjligheter för att kunna anpassa sittpositionen. En lyftsele ska vara enkel och säker att använda. Det gör att vårdtagaren och vårdaren känner sig trygga under lyftet. Låg rygg är en av våra mest använda och omtyckta lyftselar. Vårdtagaren får en upprätt sittposition och en bra tryckfördelning under benen tack vare den hårda fyllningen i bendelarna.

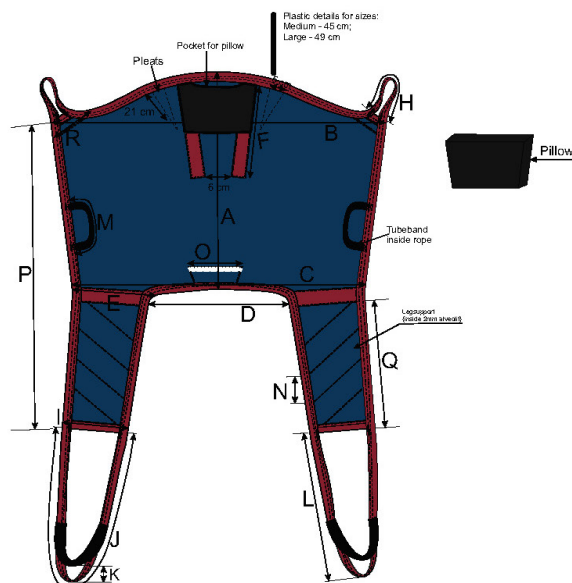


### Läs noga igenom bruksanvisningen före användning.

Att lyfta en person med lyft medför alltid en risk.


Viktigt att tänka på:

- Försäkra er om att vårdtagaren klarar av lyftsituationen.
- Se till att vårdtagaren sitter säkert i selen
- Se till att vårdtagaren har tillräckligt med kunskap om hur lyftselen används på ett säkert och korrekt sätt.
- Lyftselen ska vara individuellt utprovad.
- Lyftselen ska vara av rätt storlek, modell och material.
- Kontrollera lyftselen vid varje användningstillfälle så inget onormalt slitage uppstått. Var särskilt uppmärksam efter tvätt.
- Använd inte skadade lyfttillbehör.
- Lämna aldrig vårdtagaren utan tillsyn vid en lyftsituation.
- Planera lyftat så det sker på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt.

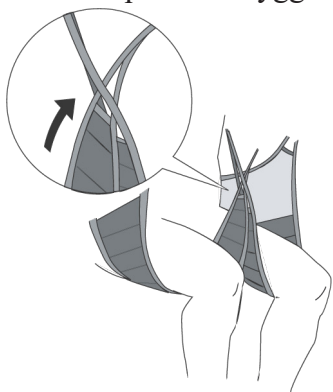

### Korslyft

Lyftbanden korsas för att undvika att benen glider isär.

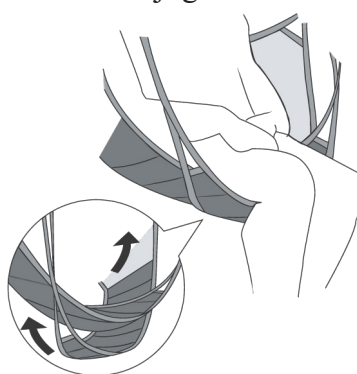

### Omlottlyft

Båda bendelarna placeras omlott under vårdtagarens lår.

