

BRUKSANVISNING



GÅBORD

**ADAM PLUS EL**



Art nr

300015910

300015910-1

300015910-2

300015910-3


PERNOVA

## Innehållsförteckning

ID-märkning.....	2
Syfte/Användningsområde.....	3
Funktioner.....	3
Normalt underhåll.....	3
Viktig information.....	4
Monteringsanvisning.....	5
Tillbehör.....	5
Förebyggande underhåll.....	6
Rekonditionering.....	6
Teknisk information.....	7
Ställdon.....	7
Sprängskiss.....	8
Reservdelslista.....	9

## ID-märkning

ID-märkningen är placerad på gåbordets chassi och innehåller följande information:

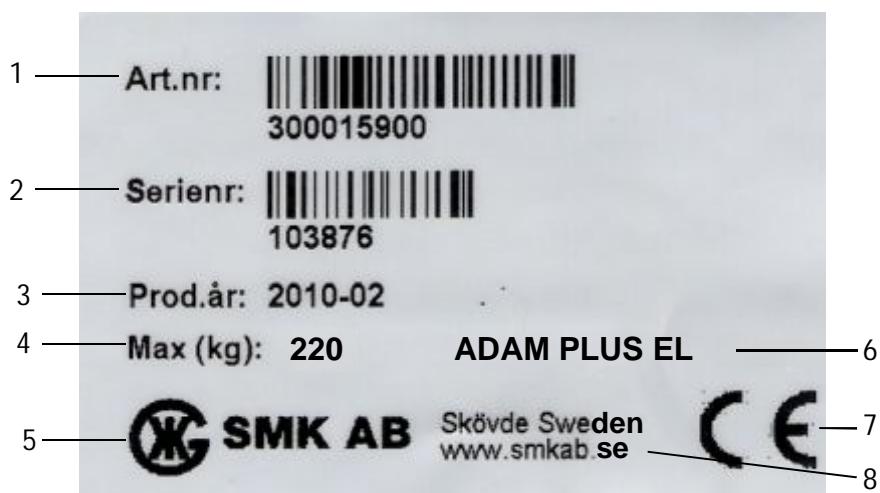

1. Artikel nummer
2. Serie nummer
3. Tillverkningsdatum (år/månad)
4. Max brukarvikt (kg)
5. Tillverkare
6. Produktnamn
7. CE-märkning
8. Adress (tillverkare)
9. EAN

## Syfte/Användningsområde

Gåbordet ADAM PLUS EL är svensktillverkat, stabilt konstruerat och utvecklat som gånghjälpmedel för användning inomhus på plana och hårda underlag.

Max brukarvikt är 220 kg.

Tillsammans med tillbehöret ståplattan kan gåbordet ADAM PLUS EL även fungera utmärkt som stå- och förflyttningshjälpmedel.

## Funktioner

Gåbordet ADAM PLUS EL har följande funktioner.

### Justering av höjd

Att ställa in en bekväm höjd är enkelt med hjälp av handkontrollen.



### Justering av handtag

Handtagen ställs in i önskad längd, vinkel och vridning med hjälp av låsspakarna.




### Justering av armstöd

Armstöden ställs in individuellt till en bekväm bredd med korsvreden på undersidan.



### Låsning/Upplåsning av hjul

Låsning av de främre hjulen görs genom att trampa ner fotbromsen. För att låsa upp trycks fotbromsen uppåt.

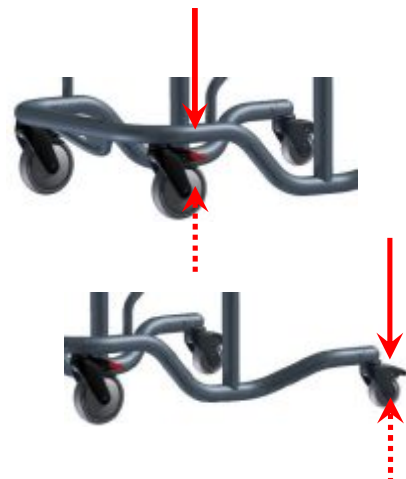

De \*bakre hjulen är utrustade med riktningsspärr som aktiveras genom att trampa ner låset. För att koppla ur riktningsspärren trycks låset uppåt.

\*Kan fås med broms.

## Normalt underhåll

-Gåbordet tvättas med vatten och vanligt rengöringsmedel utan lösningsmedel. Ytdesinfektionsmedel DAX Desisoft (vattenbaserat) eller DAX Plus (isopropanolbaserat) eller likvärdigt rekommenderas. Gåbordet tål även högtryckstvätt/maskintvätt i 60°C

-Torka med torr eller något fuktad trasa.

-Kontrollera att hjulen är fria från smuts och damm.

-Laddning av batteri skall ske så ofta som möjligt (min var tredje månad).  
Batteriet kan inte överladdas.

## Förebyggande underhåll

Utför regelbunden översyn av utrustningen för att den skall fungera tryggt och säkert för brukaren.

-Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt samt att lås- och riktningsfunktionerna fungerar. Vid byte av hjul, använd locktite eller motsvarande för att låsa skruven.

-Kontrollera att låsspakar fungerar tillfredställande.

Vid byte av delar på gåbordet ska originaldelar användas för att CE-märkningen skall gälla. Se reservdelslistan nedan.

Vid egna förändringar på gåbordet upphör CE-märkningen att gälla.

Alla våra gåbord har 4 års garanti på material- och tillverkningsfel förutsatt att gåbordet använts på avsett sätt. Förslitning på ytbehandling, hjul, batteri, bromsdelar eller handtag omfattas inte.

## Viktig information

**-GÅBORDET FÅR INTE ANVÄNDAS TILL NÅGOT ANNAT ÄN DET ÄR AVSETT FÖR!**

**-KONTROLLERA ATT SAMTLIGA LÅSSPAKAR OCH VRED ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGNA!**

**-VAR UPPMÄRKSAM PÅ KLÄMRISK!**

**-INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN BÖR BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR!**



## Monteringsanvisning



Montering av gåbordet ADAM PLUS EL görs enkelt med 9 st skruvar.

-Montera mellandel A på underdelen B med 4 st skruv (C).

-Skruva fast överdelen D på mellandelen A med 4 st skruv (E).

-Handtagen F vrids till önskad position genom att släppa på låsspak G.

-Ställdon H monteras på överdelen D tillsammans med stativ K med skruv (I) och låsmutter (J).

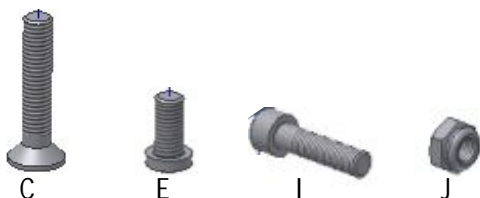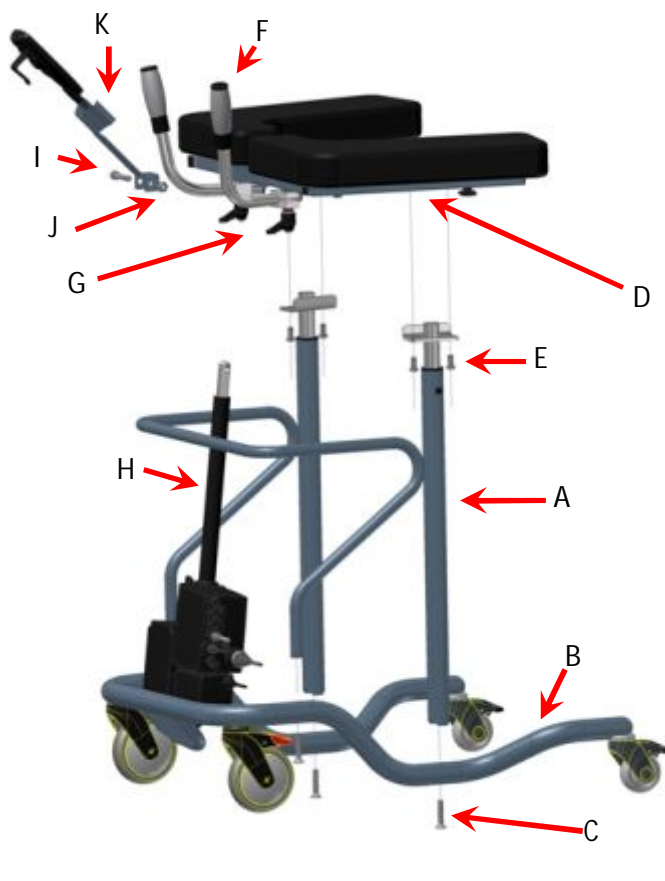

*OBS! Vid montage skall skruv C och E dras hårt (rekommendation är ett åtdragningsmoment på 30Nm). Bör efterdras efter viss tids användning.*

## Tillbehör

Tillsammans med tillbehören blir gåbordet ADAM PLUS EL ett än mer funktionellt hjälpmedel till brukaren. Genom att till exempel montera/hänga på ståplattan kan gåbordet ADAM PLUS EL även fungera utmärkt som stå- och förflyttningshjälpmedel.



<u>Produkt</u>	<u>Art. Nr.</u>
Syrgashållare (kräver 1 st universalfäste).....	300015725
Universalfäste (till syrgashållare, bricka och droppställning).....	300715726
Bricka (kräver 2 st universalfäste).....	300015727
Droppställning (kräver 1 st universalfäste).....	300015728
Stödhjul.....	300015911
Sidostöd.....	300015711
Ståplatta.....	300016200

## **Rekonditioneringsanvisning** (rekommenderas minst 1 gång/år)

Kontrollera underhållsinstruktioner enl sida 4

Kontrollera att samtliga skruvförband (9 st) är ordentligt åtdragna.

Kontrollera att det inte finns någon snedhet i chassit och att alla 4 hjul står stadigt på underlaget.

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt samt att lås- och riktningsfunktionerna fungerar. Vid byte av hjul, använd locktite eller motsvarande för att låsa skruven.

Kontrollera att höjning och sänkning fungerar, inställning av armstöd samt justering av handtagen.

Kontrollera att ställdonet fungerar tillfredställande och inte har något missljud.

Gåbordet tvättas med vatten och vanligt rengöringsmedel utan lösningsmedel.

Ytdesinfektionsmedel DAX Desisoft (vattenbaserat) eller DAX Plus (isopropanolbaserat) eller likvärdigt rekommenderas.

Torka med torr eller något fuktad trasa.

Kontrollera att ID-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

Vid byte av delar på gåbordet ska originaldelar användas för att CE-märkningen skall gälla. Se reservdelslistan nedan.


Vid egna förändringar på gåbordet upphör CE-märkningen att gälla.

Om bruksanvisningen till gåbordet förkommit kan denna hämtas på [www.activecare.se](http://www.activecare.se)

## Teknisk data ADAM PLUS EL

### Specifikation

Reglerbar höjd:.....	820-1220 mm (Art nr: 300015910) 920-1320 mm (Art nr: 300015910-1)
Bredd:.....	760 mm
Djup/längd:.....	875 mm
Vikt:.....	27 kg
Färg:.....	RAL 5014

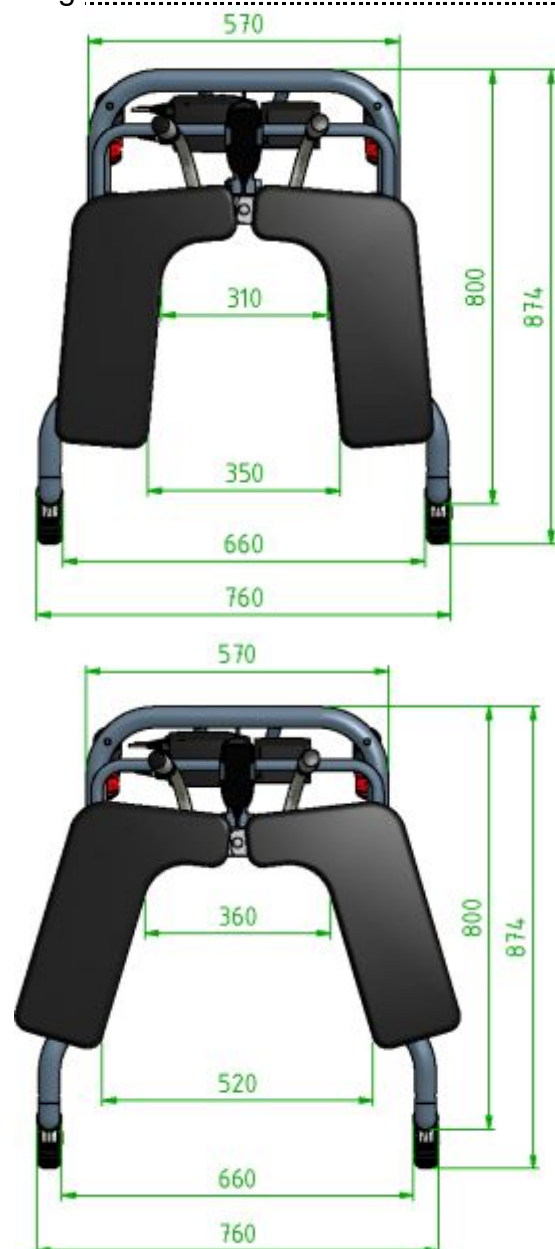


### Tål Vatten!

Alla elektriska komponenter har  
elsäkerhetsklass IPX6.

## Ställdon


### Kopplingsschema styrbox

1. Ställdon
2. Handkontroll
3. Stickpropp (220V)
4. Batteri

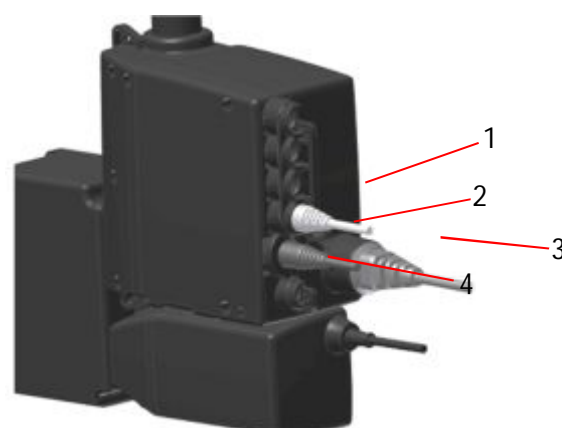



## Sprängskiss

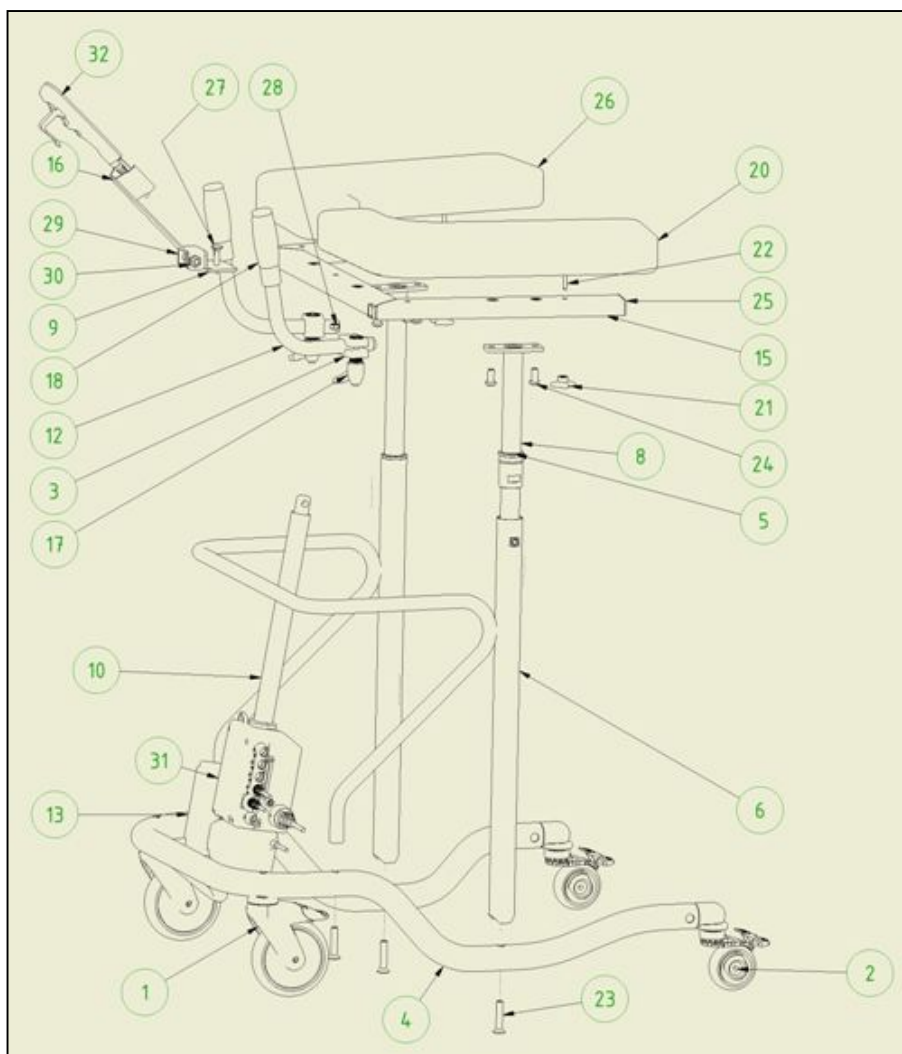

Nr	Antal	Benämning	Artikel nummer
1	2	LÄNKHJUL Ø 125 BROMSAD	090034
2	2	LÄNKHJUL Ø 75 MED RIKTNINGSSPÄRR	090035
3	2	HANDTAGSLÅSNING KPL	13-090416
4	1	BOTTENBÅGE ADAM EL 200 KPL	13-090420-13
5	2	PLASTSTYRNING ADAM EL 200	13-091005-01
6	1	STÄNDARE MED STÖDBÅGE KPL	13-090420-07
8	2	KROMBEN KPL L=653	13-090420-04
9	1	FÄSTE TILL STÄLLDON KPL	13-091006-04
10	1	STÄLLDON LA31	090LA31
12	2	HANDTAGSRÖR GÅBORD	13-091007-02
13	1	BATTERIENHET BA18	090BA18
15	1	ÖVERDEL TILL ADAM EL 200	13-091012
16	1	HÅLLARE TILL HANDKONTROLL KPL	13-100118
17	2	LÅSSPAK M10X50	LSS84M1050S
18	2	HANDTAG	090490
20	1	DYNA VÄNSTER KPL	12091550
21	2	KORSVRED WN64 60-M6	090227
22	2	M6X40 MVB FZB	603060401
23	4	M10X60 MF6S FZB	45210060G
24	4	M10X20 K6S FZB	76010020G
25	2	PLASTFOT 50x25 SVART	VL 50X25 SV
26	1	DYNA HÖGER KPL	12091551
27	1	M8X40 MVB FZB	603080401
28	1	M8 LÅSMUTTER DIN 985 FZB	9850801
29	1	M10X55 MC6S FZB	9128100551
30	2	M10 LÅSMUTTER	9851001
31	1	STYRENHET CB9	090CB9
32	1	HANDKONTROLL HB80	090HB80

## Reservdel lista



<u>Produktnamn</u>	<u>Art. Nr.</u>
Dyna vänster.....	12091550
Dyna höger.....	12091551
Handtag .....	1558-3
Låsspak .....	LSS84M1050S
Korsvred.....	090227
Hjul fram/med broms.....	090034
Hjul bak/med riktningsspärr.....	090035
Hjul bak/med broms.....	090036
Handkontroll .....	090HB80
Styrenhet.....	090CB9
Ställdon LA31.....	090LA31
Batteri.....	090BA18

Pernova Hjälpmedel AB  
Karlgårdsvägen 22  
922 32 Vindeln  
Sweden  
Tel +46(0)451 705400

E-mail [info@pernova.se](mailto:info@pernova.se)  
Internet [www.pernova.se](http://www.pernova.se)