

## Tillbehör




Hållare  
Korg

Art. nr. 300715730  
Art. nr. 300014110



Sidostöd kpl par Art. nr. 300015710

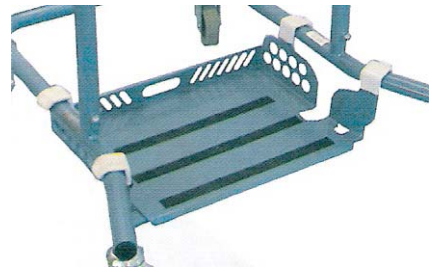

Ståplatta

Art. nr. 300015780



Droppställning

Art. nr. 300015720

Active Care Sverup AB  
Ugglealavägen 27  
427 40 Billdal  
Sweden  
Tel +46(0)31 91 75 25  
Mob.+46(0)707 55 69 80  
Fax +46(0)31 91 75 05  
email [info@activecare.se](mailto:info@activecare.se)  
internet [www.activecare.se](http://www.activecare.se)

## Bruksanvisning


# Gåbord ADAM gasfjäder 25kg



Art. nr. 12001525

 **ACTIVE**  
care

 **SMK AB**

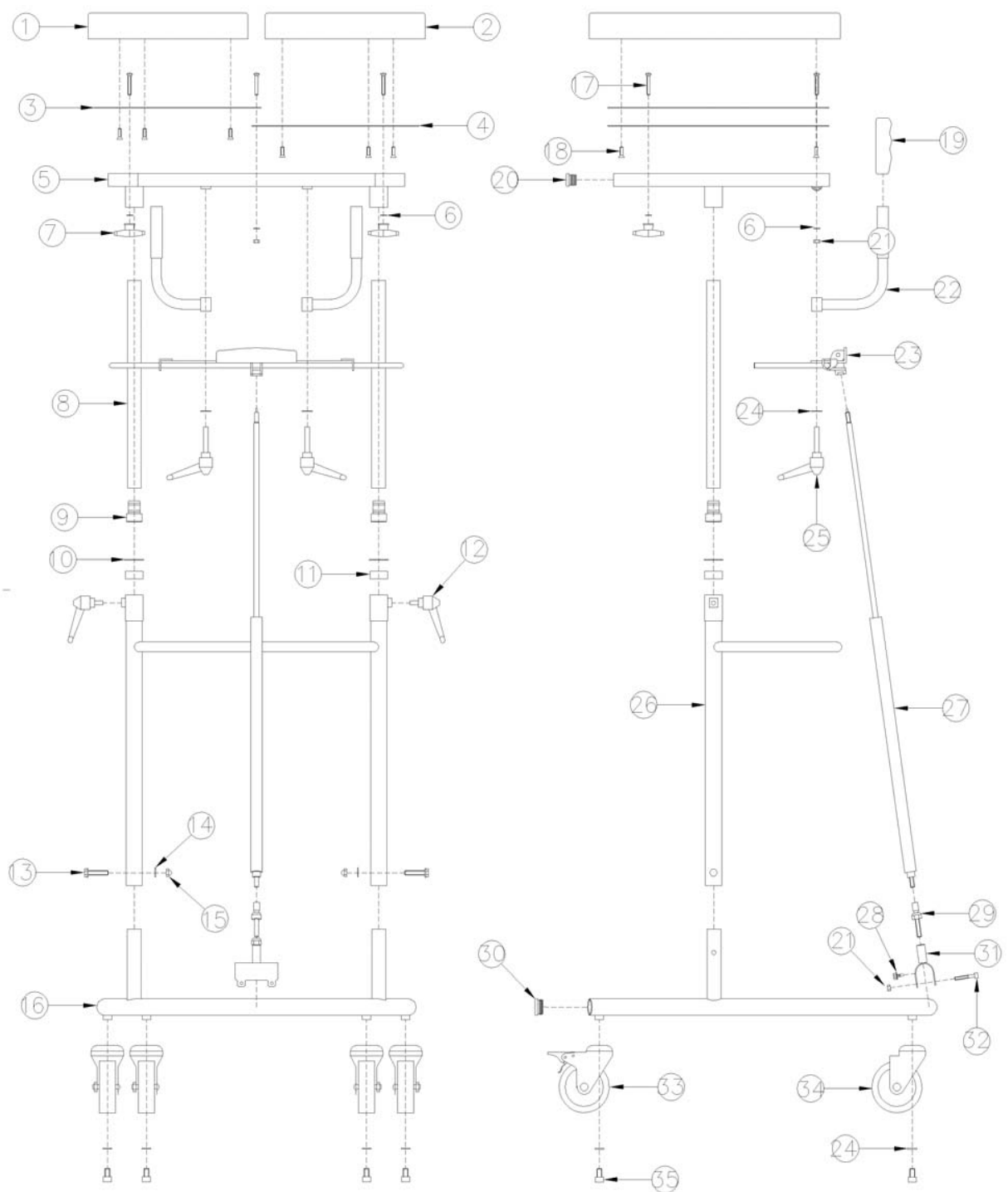

Nr	Antal	Benämning	Art. nr
1	1	Dyna höger	1558-1
2	1	Dyna vänster	1558-2
3	1	Underdel till dyna 1550 höger	1563-2
4	1	Underdel till dyna 1550 vänster	1563-1
5	1	Överdel till 1550	1552
6	3	Bricka, BRB 6,4x12x1,5	1250641
7	2	Korsvred	090227
8	2	Kromben till 1550 Ø27x2	9338100451
9	2	Kuts till gåbord	1560-N2
10	2	Flänsring, SW stål 35 FZB	SW0351
11	2	Nylonhylsa	1590-N1
12	2	Låsspak WN511 83-M10x20	090221
13	2	Skruv, M8x40 M6SF	69218080401
14	2	Bricka, BRB 8,4x16x1,6	433084
15	2	M8 Kupolmutter (låg modell)	HMJPN081
16	1	Underdel till 1550	1557
17	3	Skruv, M6x40 MVBF Stål FZB	603060401
18	6	Skruv, M6x16 MFX	96506011
19	2	Handtag 22mm svart	33013219
20	2	Plastfot 50x25 svart	VL50X25 SV

Nr	Antal	Benämning	Art. nr
21	3	M6 Låsmutter	9850601
22	2	Handtag till 1550	1553
23	1	Handtagsbrygga komplett	13-1571-8
24	6	Bricka, BRB 10,5x18x1,6	4331051
25	2	Låsspak WN511 83-M10x50	090222
26	1	Mellandel 1550	1556
27	1	Gasfjäder med ventil 250N	905100-01
28	1	Skruv, 4,3x13 R6B B8x13	R6B080131
29	1	Fäste rak kullänk M8	900867
30	2	Plastfot 32mm svart	GL32 SV
31	1	Undre gasdämparfäste 1550	13-94111801
32	2	Skruv, M6x40 MC6S Insex	9128060401
33	2	100x30C10 Länkhjul BR	14490
		alt. 125x30 Länkhjul BR	14500
34	2	100x30C10 Länkhjul	14150
		alt. 125x30 Länkhjul	14160
35	4	Skruv, M10x16 MC6S Insex	9128100161

## Montering

- Gåbord ADAM gasfjäder 25kg levereras ihopmonterad.
- Handtagen, nr 22, är av transportskäl vända upp och ned. Vänd ett handtag i taget. Detta görs genom att demontera låsspak, nr 25, vänd på handtaget och montera tillbaka låsspaken med bricka.

## Användning

VAR UPPMÄRKSAM PÅ KLÄMRISK

GÅBORDET FÅR INTE ANVÄNDAS TILL NÅGOT ANNAT ÄN DET ÄR AVSETT FÖR

- Max brukarvikt 100kg
- Bekväm höjd justeras in med hjälp av gashandtag, nr 23. För att bibehålla en hög säkerhet bör låsspakarna, nr 12, vara åtdragna vid användning.
- Bekväm bredd mellan dynorna justeras med korsvreden, nr 7.
- Bekväm placering av handtagen justeras med hjälp av låsspakarna, nr 25.

KONTROLLERA ATT SAMTLIGA LÅSSPAKAR OCH VRED ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGNA! OBSERVERA ATT KROMBEN, NR 8, KAN SKADAS OM LÅSSPAK, NR 12, DRAS ÅT FÖR HÅRT.

## Skötsel

- Gåbordet tvättas med vatten och vanligt rengöringsmedel utan lösningsmedel. Torka med torr eller något fuktig trasa.
- Kontrollera att hjulen är fria från smuts och damm.
- Vid byte av hjul använd locktite eller motsvarande för att låsa skruven.
- Krombenen, nr 8, kullänk, nr 29, samt manövreringsventil på gasfjäder, nr 27, bör med jämna mellanrum smörjas med vattenfast smörjfett.

## Specifikation

Reglerbar höjd:	920-1 240mm	Innermått dynor:	340-490mm
Bredd:	690mm	Ytermått dynor:	640-780mm
Djup/längd:	700mm	Färg:	RAL 5014