

## Tillbehör




Hållare  
Korg

Art. nr. 300715730  
Art. nr. 300014110



Sidostöd kpl par    Art. nr. 300015710

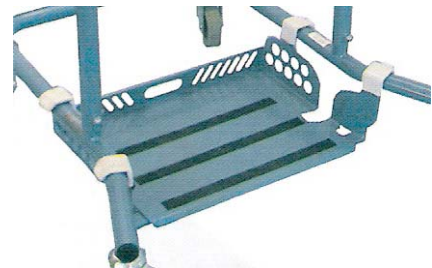

Ståplatta

Art. nr. 300015780



Droppställning

Art. nr. 300015720

Active Care Sverup AB  
Ugglealavägen 27  
427 40 Billdal  
Sweden  
Tel +46(0)31 91 75 25  
Mob.+46(0)707 55 69 80  
Fax +46(0)31 91 75 05  
email [info@activecare.se](mailto:info@activecare.se)  
internet [www.activecare.se](http://www.activecare.se)

## Bruksanvisning

# Gåbord ADAM




Art. nr. 12001550 (Delad överdel)

Art. nr. 12001551 (Hel överdel)

 **ACTIVE**  
care

 **SMK AB**

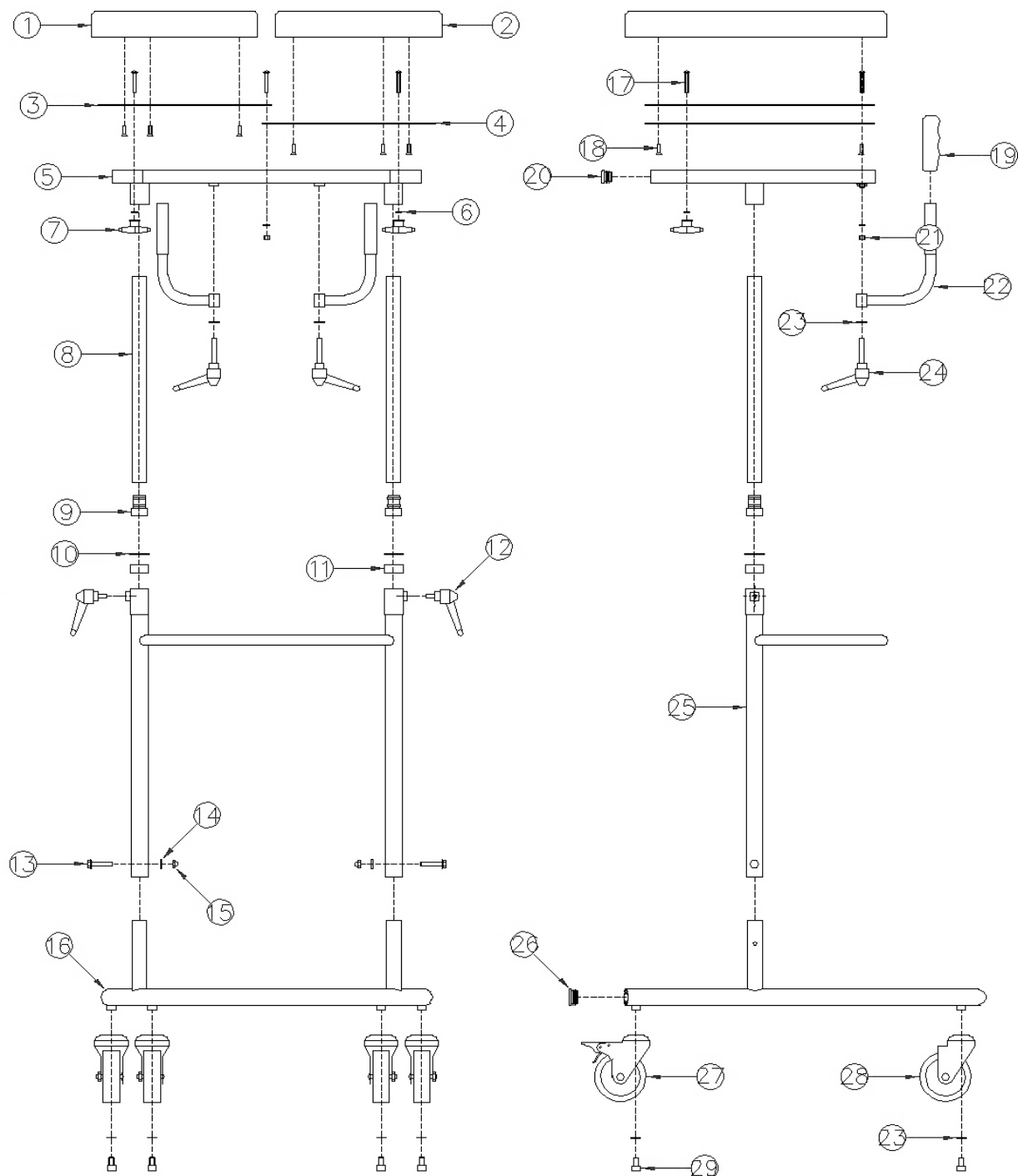

Nr	Antal	Benämning	Art. nr
1	1	Dyna höger	1558-1
2	1	Dyna vänster	1558-2
3	1	Underdel till dyna 1550 höger	1563-2
4	1	Underdel till dyna 1550 vänster	1563-1
5	1	Överdelen till 1550	1552
6	3	Bricka, BRB 6,4x12x1,5	1250641
7	2	Korsvred WN64 60-M6	090227
8	2	Kromben till 1550 Ø27x2	1555
9	2	Kuts till gåbord	1560-N2
10	2	Flänsring SW stål 35 FZB	SW0351
11	2	Nylonhylsa	1590-N1
12	2	Låsspak WN511 83-M10x20	090221
13	2	Skruv, M8x40 M6SF	69218989401
14	2	Bricka, BRB 8,4x16x1,6	433084
15	2	M8 Kupolmutter (låg modell)	HMJPN081
16	1	Underdel 1550	1557
17	3	Skruv, M6x40 MVBF	603060401
18	6	Skruv, M6x16 MFX	965060161
19	2	Handtag 22mm svart	33013219
20	2	Plastfot 50x25 svart	VL50x25 SV

Nr	Antal	Benämning	Art. nr
21	1	M6 Låsmutter	9850601
22	2	Handtag till 1550	1553
23	6	Bricka, BRB 10,5x8x1,6	4331051
24	2	Låsspak WN511 83-M10x50	090222
25	1	Mellandel 1550	1556
26	2	Plastfot 32mm svart	GL32 SV
27	2	100x30C10 Länkhjul BR	14490
		alt. 125x30 Länkhjul BR	14500
28	2	100x30C10 Länkhjul	14150
		alt. 125x30 Länkhjul	14160
29	4	Skruv, M10x16 MC6S Insex	912810061

## Montering

1. Montera mellandel, nr 25, på underdelen, nr 16, med skruv, bricka och kupolmutter, nr 13, nr 14 och nr 15.
2. Montera låsspakar, nr 12, på mellandelen, nr 25, dra ej åt.
3. Skruva fast krombenen, nr 8, i överdelen, nr 5, med handkraft.
4. Dra upp överdelen, nr 5, tills hålen i krombenen blir synliga. Använd verktyg för att dra åt krombenen. Se bild 1.



Bild 1.

5. Montera handtagen, nr 22, med medföljande låsspak, nr 24, och bricka, nr 23.

## Användning

**VAR UPPMÄRKSAM PÅ KLÄMRISK! GÅBORDET FÅR INTE ANVÄNDAS TILL NÅGOT ANNAT ÄN DET DET ÄR AVSETT FÖR**

- Max brukarvikt 100kg
- Bekväm höjd justeras in med hjälp av låsspakarna.
- Höj aldrig bordet högre än vad MAX-markeringen på krombenen visar.
- Bekväm bredd mellan dynorna justeras med korsvreden, nr 7.
- Bekväm placering av handtagen justeras med hjälp av låsspakarna, nr 24.

**KONTROLLERA ATT SAMTLIGA LÅSSPAKAR OCH VRED ÄR ORDENTLIGT ÅTDRAGNA! OBSERVERA ATT KROMBEN, NR 8, KAN SKADAS OM LÅSSPAK, NR12, DRAS ÅT FÖR HÅRT.**

## Skötsel

- Gåbordet tvättas med vatten och vanligt rengöringsmedel utan lösningsmedel. Torka med torr eller något fuktig trasa.
- Kontrollera att hjulen är fria från smuts och damm.
- Vid byte av hjul använd locktite eller motsvarande för att låsa skruven.
- Krombenen, nr 8, bör med jämna mellanrum smörjas med vattenfast smörjfett.

## Specifikation

Reglerbar höjd:	920-1300mm	Innermått mellan dynor:	340-490 mm
Bredd:	690mm	Ytermått dynor:	640-780 mm
Djup/längd:	700 mm	Färg:	RAL 5040