



FIV Immunodeficienza felina Ab

Il virus dell'Immunodeficienza Felina è un lentivirus T-linfotropo che causa la Sindrome dell'Immunodeficienza Acquisita nel gatto domestico. Nell'animale infetto il virus è presente nella saliva, nel sangue e nel liquido cerebro-spinale ma perché si verifichi il contagio è necessario un contatto profondo tra saliva e sangue, il che avviene tramite morso. Dopo la penetrazione nell'organismo ospite, FIV infetta le cellule bersaglio, costituite dai linfociti T, i macrofagi peritoneali, i macrofagi del liquido cerebrospinale e gli astrociti; una volta all'interno delle cellule genoma a RNA del virus viene retrotrascritto, grazie alla trascrittasi inversa virale, e integrato nel genoma della cellula ospite allo stato di provirus.

Quindi a differenza di ciò che accade nella FeLV la condivisione delle ciotole, delle lettiere e le reciproche pulizie fra gatti non rappresentano situazioni di rischio. Essendo il morso, il metodo principale di trasmissione i maschi sono più esposti alla malattia di circa 3 volte rispetto alle femmine e il virus colpisce più frequentemente i gatti di età superiore ai 5 anni.

Informazioni

Test immunocromatografico per la ricerca degli anticorpi della FIV


- Linea controllo e linea test: colore rosso
- Sensibilità: 99%
- Specificità: 99%
- Campione: siero, plasma o sangue intero di gatto
- Prodotto in Germania

Il kit contiene


- Card
- Pipette
- Diluente

Procedura d'esecuzione

Siero, plasma

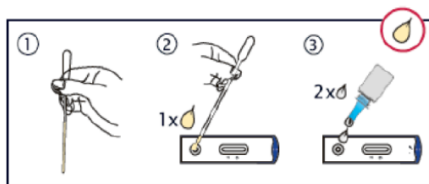

Sangue intero

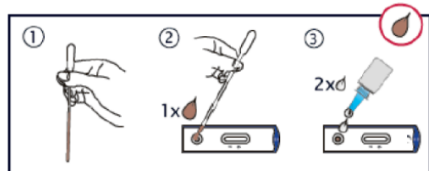


Interpretazione

Una linea in corrispondenza della C = negativo

Una linea in corrispondenza della C ed una della T = positivo

Nessuna linea o una linea solo sulla T = non valido

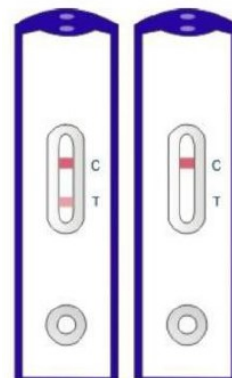

Confezioni:

da 5 test codice 111447-05,

da 10 test codice 111447-10,

da 20 test codice 111447-20