



# Coronavirus (CCV-FCoV)

# Parvovirus (CPV-FPV) Ag

Vedi scheda Coronavirus e scheda Parvovirus


## Informazioni

Test immunocromatografico per la ricerca degli antigeni del *Coronavirus* e del *Parvovirus* sia felino sia canino

- Linea controllo e linea test: colore rosso
- Sensibilità: Coronavirus 96% - Parvovirus 93%
- Specificità: Coronavirus 96% - Parvovirus 96%
- Campione: feci
- Prodotto in Germania

## Il kit contiene

- Card
- Tamponi
- Diluente

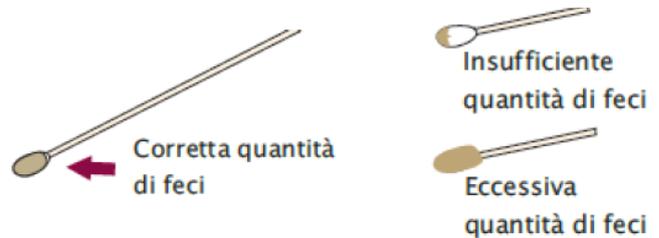

## Procedura d'esecuzione


All'apertura della busta, la card presenta due linee verdi che dimostrano che la card è funzionante. Queste due linee spariranno con la migrazione.

## Interpretazione

Una linea in corrispondenza della C = negativo

Una linea in corrispondenza della C ed una della T = positivo

Nessuna linea o una linea solo sulla T = non valido

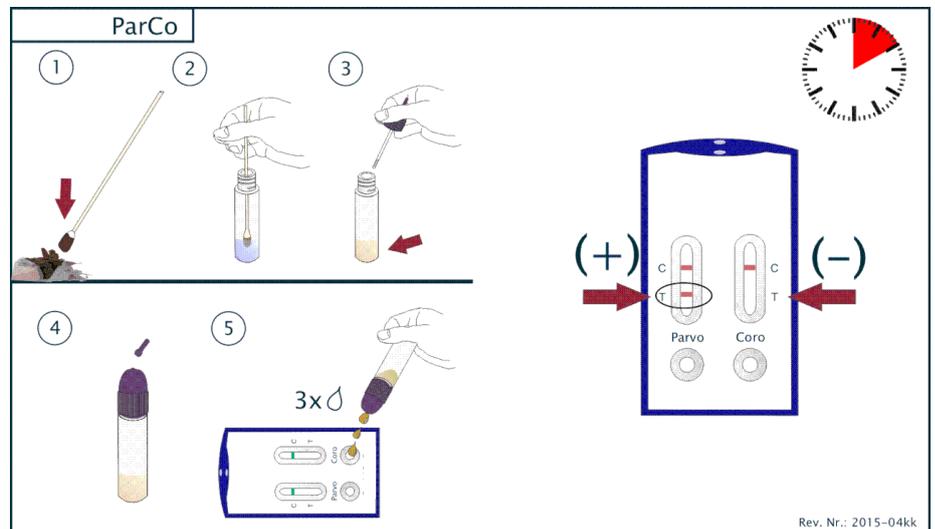

Rev. Nr.: 2015-04kk

Confezioni:

- da 5 test codice 111180-05,
- da 10 test codice 111180-10,
- da 20 test codice 111180-20