



Feci—esame parassitologico

Informazioni

Test per la ricerca dei parassiti nelle feci

- Campione: feci di cane o di gatto
- Prodotto in U.S.A.
- Prodotto atossico e biodegradabile

Procedura d'esecuzione



Raccogliere il campione di feci




**Chiudere accuratamente
Agitare con cura
Togliere il tappo verde**



**Capovolgere e posizionare nell'apposita confezione
Lasciar sedimentare per 15 minuti**



**Scartare la prima goccia
Mettere la seconda su un vetrino
Leggere al microscopio**

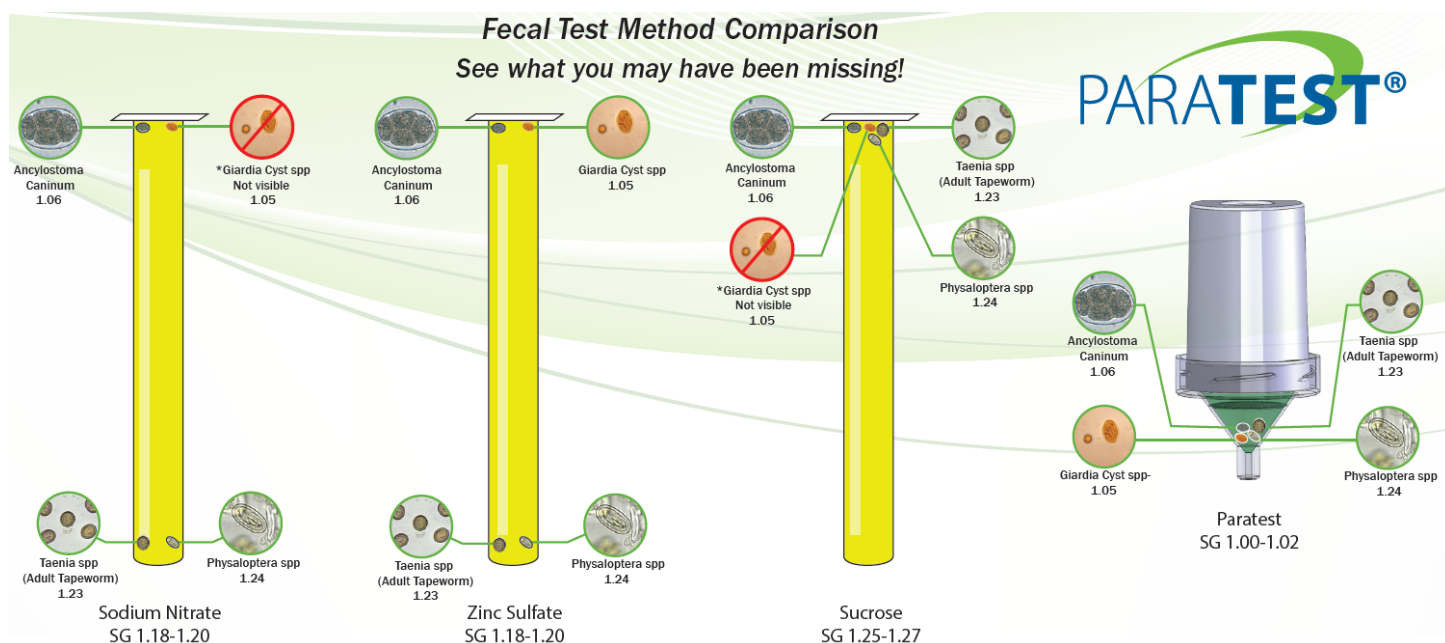

Confezioni:

da 6 test codice PTSTART6,

da 25 test codice PT25

da 200 test codice PT200BULK