



Toxoplasmosi Ag

Il *Toxoplasma gondii* è un protozoo intracellulare obbligato e infetta una vasta gamma di animali a sangue caldo tra cui il 30% della popolazione umana mondiale. L'infezione è spesso asintomatica, ma persiste per tutta la vita. *T. gondii* può causare la morte dei feti o di neonati di madri che hanno contratto la malattia o la sua riattivazione in gravidanza. Sono particolarmente esposti alla reinfezione tutti i soggetti immunodepressi (gatti con FIV).

Informazioni

Test immunocromatografico per la ricerca degli antigeni di *Toxoplasma gondii*.

- Linea controllo e linea test: colore rosso
- Campione: siero o feci di gatto
- Prodotto in Cina

Il kit contiene

- Card
- Pipette e provette
- Tamponi
- Diluente

Preparazione e procedura d'esecuzione

Siero o feci

Siero

Mettere 1 goccia di siero con 3 gocce di diluente nella provetta acclusa ed agitare.

Feci

1) Prelevare vari campioni di feci fresche emesse di recente, o eseguire un tampone rettale.

2) Mettere una parte di feci o il tampone (agitandolo per almeno 10 secondi) nella provetta contenente il diluente.

3) Agitare la provetta con il diluente in modo sufficiente così da rendere omogenea la distribuzione del campione da analizzare all'interno della provetta ed assicurare una buona estrazione del campione da analizzare.

4) Il campione che si estrae deve essere analizzato immediatamente dopo la sua preparazione.

5) Campioni che contengono del precipitato possono invalidare il test. Ogni campione deve essere limpido prima dell'esecuzione del test.

Esecuzione del test



1. Togliere la cassetta test dall'involucro protettivo e porla su una superficie piatta ed asciutta.

2. Raccogliere il campione usando l'apposita pipetta contagocce

3. Aggiungere 3 gocce (approssimativamente 100 µl) di **siero diluito 1:3** (1 goccia + 3 gocce di diluente) o di surnatante delle feci del soggetto in esame nell'apposito alloggiamento S

4. Appena il test inizia a reagire, si vedrà comparire al centro della zona test un colore rosso porpora.

5. Leggere i risultati da 5 a 10 minuti. Non leggere dopo 10 minuti.

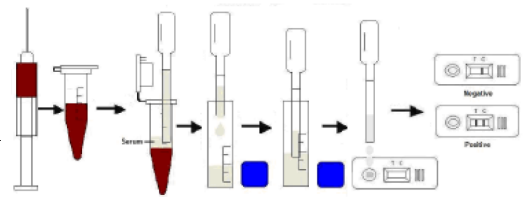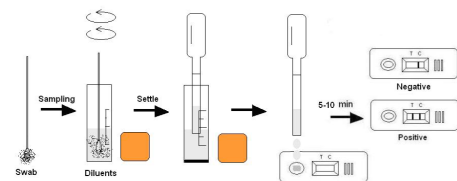

Interpretazione

Una linea in corrispondenza della C = negativo

Una linea in corrispondenza della C ed una della T = positivo

Nessuna linea o una linea solo sulla T = non valido

Confezioni:

da 10 test codice W81021-10,

da 20 test codice W81021-20

